



OMRON Healthcare

Une vie plus saine, sans compromis !

Notre vision consiste à tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible l'impact des problèmes de santé. Ainsi, nous aidons les patients à mener une existence plus épanouissante, qui ne soit pas entièrement régie par leur affection. Grâce aux produits et innovations d'OMRON Healthcare, nous voulons réduire les compromis que les patients ont à faire afin qu'ils puissent mener la vie qu'ils souhaitent.

Nous voulons limiter autant que possible l'impact des problèmes de santé sur la vie. Nous nous efforçons constamment d'améliorer la qualité de vie. Car quand il s'agit d'offrir une vie meilleure, nous ne faisons aucun compromis.



À propos D'OMRON Healthcare

OMRON Healthcare, un des leaders mondiaux dans le secteur des équipements médicaux innovants et cliniquement prouvés de surveillance de la santé et de thérapie, s'engage à aider les personnes à mener une vie plus riche et plus épanouie, sans compromis.

OMRON Healthcare est le numéro 1 mondial dans le domaine des tensiomètres numériques et des nébuliseurs destinés au traitement des maladies respiratoires. Nos autres catégories majeures de produits sont les dispositifs de soulagement de la douleur, les thermomètres électroniques et les moniteurs de composition corporelle.


Depuis plusieurs décennies, les produits OMRON aident les personnes à prévenir, traiter et prendre en charge leurs troubles médicaux, à domicile et dans un cadre clinique, dans plus de 110 pays à travers le monde.

GOING FOR **ZERO**

OMRON

OMRON Connect

Comprenez vos relevés de mesure et centralisez toutes les données relatives à votre santé!

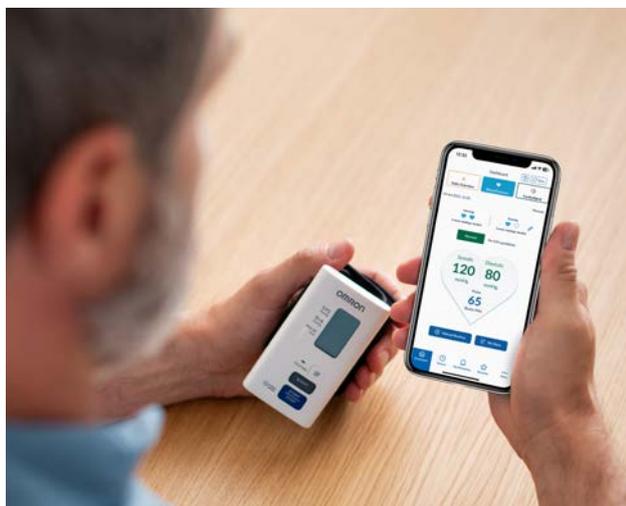

Transformez les connaissances en résultats

Fixez-vous des objectifs personnels et suivez vos progrès. Grâce à des conseils pratiques pour mieux comprendre les données de vos mesures, vous serez plus efficace pour atteindre vos objectifs, et vous verrez clairement l'impact de vos décisions concrètes sur vos résultats.

Restez curieux

Collectez les données de tous vos appareils OMRON en un seul endroit, suivez vos tendances au fil du temps et découvrez comment vos choix de mode de vie, vos médicaments et votre activité physique améliorent votre santé.

Partagez vos mesures à tout moment

Transformez en un tournemain vos données OMRON Connect en rapports au format PDF ou CSV que vous pouvez facilement partager ; pratique pour votre propre analyse ou pour tenir votre médecin et vos proches informés !

Éclairages pertinents. Un cœur en bonne santé.

Comparez vos relevés de tension artérielle avec les valeurs de référence utilisées par les médecins.

Synchronisation avec Google Fit et Apple Health.

Consultez tous vos progrès dans un seul espace. Définissez un objectif d'activité dans OMRON Connect et commencez votre parcours vers un mode de vie plus sain.

Avantages d'OMRON Connect

✓ Vos données dans la liste de sélection

Permet une intégration automatique transparente avec d'autres applications et services.

✓ Toujours connecté

Utilise la dernière technologie Bluetooth Smart pour des connexions stables et une faible consommation d'énergie.

✓ Personnel et pratique

Accès à vos données de santé essentielles quand et où vous le souhaitez sur votre smartphone.

✓ Facile à utiliser

Connexion Bluetooth de l'appareil à l'aide d'un seul bouton.
Instructions étape par étape.
Interface universelle intuitive.

✓ Sûr et privé

L'inscription de l'utilisateur n'est pas nécessaire. Gérez les données que vous partagez.

Les appareils pouvant être connectés à l'application OMRON Connect sont reconnaissables à ce symbole :



Table des matières



Mesure de la tension artérielle

07

La prise de mesures à la maison ou en déplacement est primordiale pour contrôler les problèmes d'hypertension. Que vous soyez à la recherche d'un tensiomètre à placer sur le bras ou au poignet, nous avons le modèle adapté à vos besoins. Précis, fiable et pratique.



ECG

25

Détectez rapidement les irrégularités du rythme cardiaque.



Thérapie respiratoire

27

À l'heure actuelle, notre société est en proie de manière croissante à des problèmes respiratoires. Dans l'optique de traiter une multitude de troubles respiratoires et de soulager la douleur, nous offrons un vaste choix de produits.



Gestion de la douleur

37

La douleur peut véritablement constituer un frein à vos activités. Profitez de solutions pour soulager la douleur rapidement et efficacement afin de mener votre vie comme bon vous semble.



Contrôle du poids

41

Il est important de surveiller votre poids et votre composition corporelle pour maintenir un bon équilibre. Pour ce faire, il suffit de monter sur l'un de nos appareils et de lire vos résultats.



Mesure de la température

49

La fièvre représente un signe précoce d'un ennui de santé. Vous voulez pouvoir compter sur la plus grande fiabilité. OMRON vous propose un éventail de modèles d'une qualité supérieure.



OMRON

Mesure de la tension artérielle

Une tension artérielle élevée n'est souvent pas ressentie, mais augmente considérablement le risque d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Il est donc recommandé de mesurer régulièrement votre tension artérielle !

Il existe certaines situations dans lesquelles vous mesurez votre tension artérielle à la maison : à la demande de votre médecin ou de votre propre initiative. Si vous prenez des médicaments ou modifiez votre mode de vie pour réduire votre tension artérielle, il peut s'avérer utile de définir des objectifs et de surveiller vos progrès. En fait, les patients qui surveillent leur tension artérielle sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs.

Si vous êtes de ceux dont la tension artérielle augmente à chaque fois que vous allez consulter votre médecin ou que vous vous trouvez dans la salle d'attente de l'hôpital (une affection connue sous le nom de syndrome de la blouse blanche), la mesure de votre tension chez vous peut donner une idée plus réaliste de votre état dans des conditions quotidiennes plus décontractées.

Pourquoi OMRON ?

OMRON est la première marque recommandée par les cardiologues pour les tensiomètres destinés à une utilisation à domicile.



Mesure professionnelle de la tension artérielle au niveau du bras

OMR-HBP-1120



HBP-1120

Tensiomètre au bras professionnel

Le HBP-1120 est spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements professionnels et a démontré cliniquement qu'il produisait des résultats rapides et fiables.

- **Mode Double** – en fonction de l'état du patient, comme en cas de fibrillation auriculaire, il est possible d'opter pour un oscillomètre entièrement automatique ou pour un mode d'auscultation manuel (à l'aide d'un stéthoscope).
- **Utilisation simple** – l'interface utilisateur est conçue pour une utilisation fréquente dans un environnement clinique.
- **Facile à nettoyer** – le moniteur et les brassards peuvent être désinfectés à l'aide de détergents à base d'alcool.
- **Fonction indicateur de zéro** – l'indicateur de zéro indique que l'appareil est réinitialisé et prêt pour la mesure suivante, garantissant ainsi des résultats précis.
- **Extrêmement durable** – équipé d'une pompe extrêmement durable, d'un capteur robuste et d'un connecteur de brassard en plastique robuste de forme unique, l'appareil est suffisamment durable pour résister au quotidien dans les hôpitaux et les établissements médicaux.
- **Technologie Intelli Sense** – mesure sans surgonflage inutile du brassard.
- **5 tailles de brassard** – pour un large éventail de patients (12 à 50 cm).

OMR-HBP-1320



HBP-1320

Tensiomètre au bras professionnel

Le HBP-1320 est conçu pour être utilisé dans un environnement professionnel et est facile à transporter au quotidien. Il a été cliniquement prouvé que l'appareil produisait des résultats rapides et fiables.

- **Mode Double** – en fonction de l'état du patient, comme en cas de fibrillation auriculaire, il est possible d'opter pour un oscillomètre entièrement automatique ou pour un mode d'auscultation manuel (à l'aide d'un stéthoscope).
- **Utilisation simple** – l'interface utilisateur est conçue pour une utilisation fréquente dans un environnement clinique.
- **Facile à nettoyer** – le moniteur et les brassards peuvent être désinfectés à l'aide de détergents à base d'alcool.
- **Conception robuste** – ce moniteur est équipé d'un boîtier résistant aux chocs le protégeant des chutes.
- **Portable** – conçu pour des mesures régulières de la tension artérielle, le moniteur est compact, léger et doté d'une poignée intégrée pour faciliter le transport d'un patient à l'autre.
- **Technologie Intelli Sense** – mesure sans surgonflage inutile du brassard.
- **5 tailles de brassard** – pour un large éventail de patients (12 à 50 cm).
- Support mobile disponible (OMR-HEM-1300ST)

Mesure professionnelle de la tension artérielle au niveau du bras

OMR-907



HEM-907

Tensiomètre numérique automatique destiné aux professionnels de la santé.

- **Utilisation clinique** – conçue pour une utilisation silencieuse et pour la formation, idéale pour un environnement clinique
- **Mode Double** – en fonction de l'état du patient, comme en cas de fibrillation auriculaire, il est possible d'opter pour un oscillomètre entièrement automatique ou pour un mode d'auscultation manuel (à l'aide d'un stéthoscope).
- **Portable** – conçu pour des mesures régulières de la tension artérielle, le moniteur peut être facilement transporté d'un patient à l'autre grâce au chariot, disponible en tant qu'accessoire.
- **Précis et fiable** – normes de précision AAMI.
- **Respectueux de l'environnement** – sans mercure.
- **Technologie Intelli Sense** – mesure sans surgonflage inutile du brassard.
- **3 tailles de brassard** – pour un large éventail de patients (17 à 42cm).
- Support mobile disponible (OMR-HEM-9071300ST)

Mesure professionnelle de la tension artérielle au niveau du bras – Vue d'ensemble



Modèle	HBP-1120	HBP-1320	HEM-907
Calcul moyen			•
Détection des pulsations irrégulières	•	•	•
Détection des mouvements	•	•	
Fonction indicateur de zéro	•		
Portable		•	•
Mode Double	•	•	•
Mode automatique	•	•	•
Facile à lire	•	•	
Type et taille de brassard	22-32 cm	22-32 cm 32-44 cm	22-32 cm
Brassard en option	12-18 cm OMR-HXA-GCFSS-PBE 18-22 cm OMR-HXA-GCFS-PBE 22-32 cm OMR-HXA-GCFM-PBE 32-42 cm OMR-HXA-GCFL-PBE 42-50 cm OMR-HXA-GCFL-PBE	12-18 cm OMR-HXA-GCFSS-PBE 18-22 cm OMR-HXA-GCFS-PBE 22-32 cm OMR-HXA-GCFM-PBE 32-42 cm OMR-HXA-GCFL-PBE 42-50 cm OMR-HXA-GCFL-PBE	17-22 cm OMR-MANCH-CS19-EXWBP 22-32 cm OMR-MANCH-CR19-EXWBP 32-42 cm OMR-MANCH-CL19-EXWBP
Mémoire	250	Dernière lecture	
Facile à nettoyer	•	•	
Adaptateur secteur inclus	•	•	•
Pile rechargeable		•	•

Avantages de la technologie OMRON

Intelli Sense

Intelli Sense est une technologie exclusive développée par OMRON Healthcare qui permet de gonfler et de dégonfler les tensiomètres OMRON au niveau optimal pour chaque utilisateur individuel. Mesure rapide, pratique et confortable de la tension artérielle.

Tous les tensiomètres OMRON sont équipés de cette technologie.



Brassard IntelliWrap

Le brassard IntelliWrap est la nouvelle technologie d'OMRON qui fournit des mesures précises, quelle que soit la position du brassard sur le bras.

Le brassard Intelli Wrap d'OMRON dispose d'une zone de mesure précise qui s'enroule autour du bras, rendant pratiquement impossible tout mauvais positionnement du brassard. La technologie de brassard IntelliWrap d'OMRON garantit une précision constante, quelle que soit la position du brassard autour du bras.

Appareils équipés du brassard IntelliWrap : Evolv, M4 Intelli IT, M7 Intelli IT AFib, M6 Comfort AFib, M3 Comfort



NEW

Technologie IntelliSense AFib

Intellisense AFib est un algorithme avancé qui utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour détecter une éventuelle fibrillation auriculaire lors d'une mesure normale de la pression artérielle.

Cette technologie simplifie l'autosurveillance à domicile et est cliniquement validée.

Appareils équipés avec la technologie IntelliSense AFib : M7 IT AFib et M6 Comfort AFib



Capteur de positionnement avancé

Pour les tensiomètres au poignet, il est important de mesurer la tension artérielle au niveau du cœur, car cela permet d'obtenir une mesure précise de la tension artérielle.

- La position de mesure doit être au niveau du cœur
- La position de mesure doit être à angle correct

Le système APS (Advanced Positioning Sensor) surveille la relation poignet/cœur à l'aide des capteurs et guide le poignet dans la bonne position avec des indications sonores et visuelles.

Appareils avec capteur de positionnement : RS7 Intelli IT & RS4



Mesure de la tension artérielle au bras

OMR-EVOLV(HEM7600TE)



EVOLV

Le tensiomètre tout-en-un. Enroulez-le autour de votre bras. Appuyez sur un bouton. Commencez à mesurer votre tension artérielle.

Tensiomètre au bras tout-en-un facile à utiliser. Prenez des mesures précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras, et suivez les progrès sur votre smartphone.

- **Tensiomètre au bras tout-en-un** – Pas de tubes. Pas de fils. Simplement précis
- **Technologie de brassard Intelli Wrap** – Des mesures précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras
- **Application OMRON Connect** – Application mobile pour iPhone/Android
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras : ni trop lâche, ni trop serré
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- Mémoire de 100 mesures



Validation clinique supplémentaire pour les femmes enceintes

NEW - Technologie révolutionnaire Intellisense AFib

Avec le M7 Intelli IT AFib et le M6 Comfort AFib, OMRON présente sa dernière innovation en matière de précision : **la technologie Intellisense AFib !**

Grâce à la technologie révolutionnaire Intellisense AFib, les contrôles de routine de la tension artérielle peuvent désormais détecter automatiquement la fibrillation auriculaire, une arythmie cardiaque qui passe souvent inaperçue mais qui augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle.

Des études montrent que la détection et le traitement précoces de la fibrillation auriculaire (FA) peuvent réduire le risque d'accident vasculaire cérébral de 66 %*.



La technologie Intellisense AFib est basée sur l'IA et les techniques d'apprentissage automatique, qui pilotent cet algorithme.

La technologie a été validée cliniquement en collaboration avec des professionnels de la santé, ce qui garantit précision et fiabilité avec une **sensibilité de 95 %** et une **spécificité de 98 %**.

Les résultats ont une **précision de 97%**, ce qui confirme la supériorité de ces dispositifs.

PRÉCISION DE
97%^{**}

*Lei N, et al. Hybrid Decision Support to Monitor Atrial Fibrillation for Stroke Prevention. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan 19;18(2):813
**Diagnostic Accuracy for Detecting Atrial Fibrillation Using a Novel Machine Learning Algorithm in a Blood Pressure Monitor. Heart Rhythm published online 29 April 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2024.04.086>

OMR-M7IT.(7380T1-EBK)

NEW

M7 Intelli IT AFib

Dépistage de la fibrillation auriculaire à chaque mesure de la pression artérielle à domicile.

- **Technologie de brassard Intelli Wrap** – Des mesures précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras
- **Technologie IntelliSense AFib** - Détecte la possibilité d'une fibrillation auriculaire à chaque mesure, ce qui permet de surveiller la maladie à domicile.
- **Application OMRON connecte** – Application mobile pour iPhone/Android
- **Mode TruRead** - prend automatiquement 3 mesures consécutives à des intervalles sélectionnés et affiche la moyenne. L'intervalle est fixé par défaut à 30 secondes, mais peut être ajusté si nécessaire (15 - 30 - 60 - 120 secondes).
- **Fonctions de comparaison** – Le mode de comparaison permet de comparer non seulement les résultats du matin et du soir, mais aussi les résultats et les mesures précédentes.
- **Indicateur d'hypertension** – Indique si le résultat est supérieur au niveau recommandé
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier**
- **Système de contrôle du brassard**
- **Détection des mouvements du corps**
- **Mémoire** – 2 utilisateurs x 100 emplacements de mémoire + mode invité.



M6C.(HEM-7380-E)

NEW

M6 Comfort AFib

Une précision constante, comme chez le médecin.

- **Technologie de brassard Intelli Wrap** – Des mesures précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras
- **Technologie IntelliSense AFib** - Détecte la possibilité d'une fibrillation auriculaire à chaque mesure, ce qui permet de surveiller la maladie à domicile.
- **Mode TruRead** - prend automatiquement 3 mesures consécutives à des intervalles sélectionnés et affiche la moyenne. L'intervalle est fixé par défaut à 30 secondes, mais peut être ajusté si nécessaire (15 - 30 - 60 - 120 secondes).
- **Fonctions de comparaison** – Le mode de comparaison permet de comparer non seulement les résultats du matin et du soir, mais aussi les résultats et les mesures précédentes.
- **Indicateur d'hypertension** – Indique si le résultat est supérieur au niveau recommandé
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier**
- **Système de contrôle du brassard**
- **Détection des mouvements du corps**
- **Mémoire** – 2 utilisateurs x 100 emplacements de mémoire + mode invité.



Mesure de la tension artérielle au bras

OMR-M4IT.(7155T-EBK)



M4 Intelli IT

Précision à 360°

- **Technologie de brassard Intelli Wrap** – Des mesures précises, quelle que soit la position du brassard autour du bras
- **Application OMRON Connect** – Application mobile pour iPhone/Android
- **Indicateur d'hypertension** – Indique si le résultat est supérieur au niveau recommandé
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras: ni trop lâche, ni trop serré
- **Détection de mouvement du corps** – Signale si un mouvement excessif est détecté pendant la mesure, afin d'éviter des lectures inexactes
- **Mémoire** – 2 utilisateurs x 60 emplacements de mémoire + mode invité. Votre tensiomètre peut stocker des données pour 2 utilisateurs distincts, ce qui vous permet de suivre les mesures et tendances individuelles

OMR-M3C.(HEM-7155-E)

MEILLEUR DU TEST
TestAchats et Association de Consommateurs



M3 Comfort

Rapide, simple et précis à 360°

- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard
- **Indicateur d'hypertension** – Indique si le résultat est supérieur au niveau recommandé
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- **Détection de mouvement du corps** – Signale si un mouvement excessif est détecté pendant la mesure, afin d'éviter des lectures inexactes
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras : ni trop lâche, ni trop serré
- **Mémoire** – 2 utilisateurs x 60 emplacements de mémoire + mode invité. Votre tensiomètre peut stocker des données pour 2 utilisateurs distincts, ce qui vous permet de suivre les mesures et tendances individuelles

OMR-M2IT+(7146T2-EB)

NEW

M2 Intelli IT Plus

Mesures précises rapides et faciles.

- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard.
- **Fourni avec une manchette Easy 22 - 42cm en standard**
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – L'OMRON M2 Intelli IT Plus est capable de détecter les battements cardiaques irréguliers pendant votre mesure habituelle de la tension artérielle.
- **Détection de mouvements du corps** – Signale si un mouvement excessif est détecté pendant la mesure, afin d'éviter des lectures imprécises.
- **Icône d'indicateur d'hypertension** – S'affiche si le résultat est supérieur à celui recommandé.
- **Application OMRON Connect**– Application mobile pour iPhone/Android.
- **Mémoire** : 1 utilisateur x 30 emplacements de mémoire.



OMR-M2+(HEM-7146-E)

NEW

M2 Plus

Une solution pratique pour plus de précision.

- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard.
- **Fourni avec une manchette Easy 22 - 42cm en standard**
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – L'OMRON M2 Intelli IT Plus est capable de détecter les battements cardiaques irréguliers pendant votre mesure habituelle de la tension artérielle.
- **Détection de mouvements du corps** – Signale si un mouvement excessif est détecté pendant la mesure, afin d'éviter des lectures imprécises.
- **Icône d'indicateur d'hypertension** – S'affiche si le résultat est supérieur à celui recommandé.
- **Mémoire** : 1 utilisateur x 30 emplacements de mémoire



Mesure de la tension artérielle au bras – Vue d'ensemble



Modèle	EVOLV (HEM7600TE)	M7 Intelli IT Afib (HEM-7361T-EBK)	M6 Comfort Afib (HEM-7360-E)
Tout-en-un Pas de tubes. Pas de fils. Simplement précis.	•		
Technologie de brassard Intelli Wrap Précision à 360°. Résultats précis, quelle que soit la position du brassard autour du bras	•	•	•
OMRON Connect	•	•	
Détection d'AFib		•	•
Technologie Intelli Sense Mesure sans surgonflage inutile du brassard	•	•	•
Système de contrôle du brassard Favorise la précision des mesures	•	•	•
Type et taille de brassard	Brassard Intelli Wrap (préformé) 22-42 cm OMR-MANCH-EVOLV	Brassard Intelli Wrap (préformé) 22-42 cm OMR-MANCH-IntWrapC	Brassard Intelli Wrap (préformé) 22-42 cm OMR-MANCH-IntWrapC
Brassard en option			
Détection des pulsations irrégulières	•	•	•
Visualisation du niveau de tension artérielle Indique si le résultat est supérieur au niveau recommandé		•	•
Calcul moyen Calcule la valeur moyenne sur la base des 3 dernières mesures dans les 10 minutes		•	•
Indicateur simple de tension artérielle élevée avec couleurs La LED indique si le résultat est supérieur ou inférieur au niveau recommandé		•	•
Détection des mouvements Émet un signal lorsqu'un mouvement excessif est détecté pendant la mesure	•	•	•
Capacité de mémoire	100 *	2 utilisateurs x 100	2 utilisateurs x 100
Pochette de rangement incluse	oui	oui	oui

* Cet appareil conserve 100 mesures en mémoire. Pour consulter vos mesures, vous devez synchroniser l'appareil avec votre smartphone à l'aide de l'application OMRON Connect.



M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK)	M3 Comfort (HEM-7155-E)	M2 Intelli IT Plus (HEM-7143T1-EBK)	M2 Plus (HEM-7143-E)
•	•		
•		•	
•	•	•	•
•	•	•	•
Brassard Intelli Wrap (préformé) 22-42 cm OMR-MANCH-IntWrapC	Brassard Intelli Wrap (préformé) 22-42 cm OMR-MANCH-IntWrapC	Easy Cuff 22-42 cm OMR-MANCH-EasyC-ML	Easy Cuff 22-42 cm OMR-MANCH-EasyC-ML
		Petit brassard 17-22 cm OMR-MANCH-CS2	Petit brassard 17-22 cm OMR-MANCH-CS2
•	•	•	•
•	•	•	•
	•		
	•	•	•
•	•	•	•
2 utilisateurs x 60	2 utilisateurs x 60	1 utilisateur x 30	1 utilisateur x 30
oui	oui	oui	oui

Mesure de la tension artérielle au poignet

OMR-NIGHTVIEW(9601T)

NEW

Nightview

Tensiomètre de poignet automatique

L'OMRON NightView est un appareil qui peut également mesurer la tension artérielle pendant le sommeil de l'utilisateur.

- **Conception du brassard de poignet automatique** – Conçu pour le confort et la facilité d'utilisation, jour et nuit, avec des mesures automatiques 3 fois par nuit.
- **Confortable et totalement silencieux** – Fonctionnement totalement silencieux qui se gonfle en douceur et réduit le temps de compression. Cela a un impact minimal sur la qualité du sommeil.
- **Précision validée cliniquement** – Mesures effectuées avec précision dans différentes positions.
- **Trace les données à afficher et à partager** – Possibilité d'enregistrer et de synchroniser les données de tension artérielle. Elles peuvent ainsi être stockées et partagées en toute sécurité avec les professionnels de la santé via l'application OMRON Connect.



OMR-RS7IT(HEM6232TE)

RS7 Intelli IT

Connecté, portable et précis pour toutes les morphologies. Premier tensiomètre au poignet OMRON validé dans la population obèse.

- **Capteur de positionnement à LED** – pour des résultats précis
- **Application OMRON Connect** – Connectez-vous. Consultez à tout moment les données. Regardez la progression. Application mobile pour iPhone/Android
- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard
- **Silencieux** – Pratique pour des mesures partout et à tout moment
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras : ni trop lâche, ni trop serré
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- Suivi de l'hypertension matinale
- **Barre d'indication d'hypertension** – Indique si une hypertension est détectée à la fin de la mesure
- 2 utilisateurs x mémoire pour 100 mesures



OMR-RS4(HEM-6181-E)



RS4

Simple, portable et précis pour toutes les morphologies.

- **Capteur de positionnement à LED** – pour des résultats précis
- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras : ni trop lâche, ni trop serré
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- Suivi de l'hypertension matinale
- **Barre d'indication d'hypertension** – Indique si une hypertension est détectée à la fin de la mesure
- 1 utilisateur x mémoire pour 60 mesures

OMR-RS3(HEM-6161T-E)



RS3 Intelli IT

Simple, portable et précis pour toutes les morphologies.

- **Application OMRON Connect** – Connectez-vous. Consultez à tout moment les données. Regardez la progression. Application mobile pour iPhone/Android
- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras : ni trop lâche, ni trop serré
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- 1 utilisateur x mémoire pour 30 mesures

OMR-RS2(HEM-6161-E)



RS2

Simple, portable et précis pour toutes les morphologies.

- **Technologie Intelli Sense** – Mesure sans surgonflage inutile du brassard
- **Système de contrôle du brassard** – Indique si le brassard est correctement placé autour du bras : ni trop lâche, ni trop serré
- **Détection de rythme cardiaque irrégulier** – Indique si un battement irrégulier du cœur est détecté pendant la mesure
- 1 utilisateur x mémoire pour 30 mesures

Mesure de la tension artérielle au poignet – Vue d'ensemble



Modèle	Nightview (HEM-9601T-E3)	RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)
Capteur de positionnement	•	•
OMRON Connect	•	•
Silencieux	•	•
Technologie Intelli Sense	•	•
Système de contrôle du brassard		•
Détection des pulsations irrégulières	•	•
Suivi de l'hypertension matinale	•	•
Barre d'indication d'hypertension		•
Détection des mouvements		•
Taille du brassard	13,5-21,5 cm	13,5-21,5 cm
Capacité de mémoire	1 utilisateur x 350	2 utilisateurs x 100
Pochette de rangement	•	•



RS4 (HEM-6181-E)	RS3 Intelli IT (HEM-6161T-E)	RS2 (HEM-6161-E)
•		
	•	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•		
•		
•		
13,5-21,5 cm	13,5-21,5 cm	13,5-21,5 cm
1 utilisateur x 60	1 utilisateur x 30	1 utilisateur x 30
•	•	•

Qu'est-ce que la validation clinique ?

Validé cliniquement signifie qu'un produit a été évalué par une organisation indépendante et testé par rapport à des exigences strictes définies par de nombreuses organisations internationales telles que la British Hypertension Society (BHS), la Société européenne pour l'hypertension (ESH) et le protocole international (IP), pour n'en citer que quelques-unes.

Validation clinique



Noms de produits	Codes	Validé cliniquement au sein de la population générale	Validé cliniquement au sein de la population diabétique	Validation clinique chez les femmes enceintes	Validation clinique au sein de la population obèse
EVOLV	HEM-7600T-E	●		●	
M7 Intelli IT AFib	HEM-7380T1-EBK	●	●	●	
M6 Comfort AFib	HEM-7380-E	●	●	●	
M4 Intelli IT	HEM-7155T-EBK	●			
M3 Comfort	HEM-7134-E	●	●	●	
M2 Intelli IT Plus	HEM-7146T2-EBK	●			
M2 Plus	HEM-7146-E	●			
Nightview	HEM-9601T-E3	●			
RS7 Intelli IT	HEM-6232T-E	●			●
RS4	HEM-6181-E	●			
RS3 Intelli IT	HEM-6161T-E	●			
RS2	HEM-6161-E	●			

Pourquoi est-il important qu'un appareil soit cliniquement validé pour une utilisation au sein de groupes de patients spécifiques ?

Certains patients souffrent de maladies particulières venant affecter la précision des mesures de la tension artérielle, comme une rigidité artérielle chez les patients diabétiques, une circonférence de bras élevée chez les patients obèses et des changements hémodynamiques chez les femmes enceintes.

Chez OMRON Healthcare, nous nous engageons à minimiser l'impact des maladies et à aider les gens à vivre une vie plus épanouie avec nos produits.

Les appareils OMRON sont également précis pour des groupes de patients spécifiques, comme la population diabétique, la population obèse et les femmes enceintes.

Validé cliniquement signifie : précision prouvée

La PRÉCISION de l'appareil est primordiale pour sélectionner le tensiomètre à des fins cliniques et d'automesure. Un appareil validé cliniquement donne au client la certitude que le tensiomètre OMRON est un appareil recommandé.



Obésité

2 des 5 principaux problèmes de santé liés à l'obésité sont les risques de maladies cardiovasculaires. L'hypertension est la 2e maladie à laquelle les patients en surpoids et obèses peuvent être confrontés.

OMRON a créé la solution sous la forme d'un tensiomètre au poignet pour aider les personnes obèses à contrôler leur tension artérielle. Il a été prouvé que le modèle RS7 Intelli IT a été validé avec succès dans la population obèse selon le protocole ESH-IP modifié.



Diabète

Des études menées à l'université d'Oxford révèlent que 60 % de la population diabétique souffre d'hypertension et que cela peut entraîner des complications telles que des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des insuffisances rénales.

Un patient diabétique non traité présente un risque 2 à 4 fois plus élevé de développer un événement cardiovasculaire. Pour réduire le risque, les patients doivent surveiller leur tension artérielle.

OMRON dispose d'appareils déjà validés pour les patients diabétiques (type II). Les appareils ont été validés avec succès dans un protocole ESH-IP modifié.



Grossesse

10 % des femmes enceintes peuvent souffrir d'un trouble de la tension artérielle pouvant entraîner une prééclampsie. La prééclampsie peut entraîner une éclampsie susceptible de causer des dommages à la mère et au bébé, voire d'entraîner la mort.

Les tensiomètres OMRON avec brassard IntelliWrap ont été validés avec succès chez les femmes enceintes avec et sans prééclampsie. Les appareils ont été validés avec succès dans un protocole ESH modifié.



OMRON

ECG

Détection de l'hypertension et de la fibrillation auriculaire

L'hypertension artérielle et les irrégularités causées par la fibrillation auriculaire (ou AFib) sont des maladies sous-jacentes fréquentes qui peuvent souvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux.

Comme elle ne se répète pas souvent, la fibrillation auriculaire est particulièrement difficile à détecter lors d'un examen physique annuel et constitue une maladie non traitée qui passe inaperçue pour de nombreuses personnes.

La détection précoce de ces maladies cardiaques à domicile peut transformer la vie des soignants, des patients et de leurs soignants.

OMRON Complete est la solution. Un double moniteur intelligent capable de détecter simultanément l'hypertension et la fibrillation auriculaire, et ce, à la maison en tout confort.

L'appareil permet aux patients et aux soignants de surveiller leur état de santé de manière cohérente et précise à domicile.

Avec OMRON Complete, les professionnels de la santé disposent d'une vue d'ensemble complète de l'état cardiaque d'un patient, ce qui aide à prendre de meilleures décisions en matière de diagnostic, de traitement et de soins généraux.

NEW

OMRON Complete

Le tensiomètre intelligent 2-en-1 et l'ECG à domicile

L'OMRON Complete est un tensiomètre précis et simple avec enregistrement ECG. Ce moniteur enregistre les mesures et les données.

- ECG à dérivation unique lors d'un contrôle régulier de la tension artérielle, mesure 2 paramètres critiques
- en une seule fois avec un seul appareil facile à utiliser pour un contrôle sans problème.
- Détecte une série d'affections cardiaques et d'irrégularités du rythme cardiaque (AFib, tachycardie, bradycardie), l'hypertension et l'hypotension, le rythme sinusoïdal normal.
- **Détection de mouvement du corps** – émet un signal si un mouvement excessif est détecté pendant la mesure, afin d'éviter des lectures imprécises.
- Facile, précis, direct. Intégrez facilement la surveillance régulière à votre routine quotidienne avec des résultats clairs et immédiats pour suivre les progrès.
- **Application OMRON Connect** – Transfert automatique des données via l'application OMRON Connect, accessible à tout moment.
- **Technologie Intelli Sense** – mesure sans surgonflage inutile du brassard.
- **Système de contrôle du brassard** – indique que le brassard est correctement enroulé.
- Avec brassard (OMR-MANCH-RML31)

OMR-COMP(HEM7530TE3)





OMRON

Thérapie respiratoire

Les nébuliseurs sont des appareils qui vous aident à respirer facilement. Ils sont utilisés pour traiter les affections des voies respiratoires supérieures, intermédiaires et inférieures.

Lorsque vous choisissez un nébuliseur, vous devez tenir compte de l'âge de l'utilisateur, de la taille des particules et de l'intensité de l'utilisation.

Les nébuliseurs peuvent être utilisés avec des médicaments sur ordonnance pour ouvrir les voies respiratoires ou avec une solution saline pour garder le nez propre et éviter que les symptômes légers se transforment en maladie pulmonaire grave (= PRE-COLD).

En cas d'inhalation pour le traitement de problèmes respiratoires, le médicament pénètre directement dans les voies respiratoires, avec peu d'effets secondaires. Les nébuliseurs présentent le grand avantage qu'aucune coordination respiratoire spécifique n'est requise. Les patients peuvent prendre les médicaments tout en continuant à respirer, et ils peuvent également combiner les médicaments selon les instructions du médecin.

10 conseils pour une technique de nébulisation correcte

01 Placer le dispositif sur une surface horizontale et verser goutte à goutte la dose prescrite de médicament dans le nébuliseur.

02 S'asseoir juste en face du dispositif.

03 Mettre le dispositif en marche.

04 Placer l'embout buccal dans la bouche et bien presser les lèvres autour (ou placer le masque sur le nez et la bouche).

05 Incliner légèrement la tête en arrière.

06 Inspirer lentement par la bouche. Bloquer la respiration pendant 5 secondes et expirer calmement.

07 Continuer à nébuliser jusqu'à 1 minute après que le nébuliseur commence à « crachoter ».

08 Éteindre le dispositif.

09 Rincer la bouche et ne pas avaler. Rincer le nébuliseur et les autres pièces lavables avec de l'eau chaude et laisser sécher sur un linge propre.

10 Pour un entretien correct, il est important de toujours suivre avec précision les indications du mode d'emploi.

Nébuliseur à tamis

Un nébuliseur à tamis est l'innovation par excellence pour les nébuliseurs portables. Vous pouvez facilement l'emporter en vacances ou l'utiliser lorsque vous n'avez pas d'alimentation électrique. Le nébuliseur portable comprime le médicament par des trous ultra-fins grâce à des vibrations basse fréquence. Aucun compresseur n'est donc nécessaire pour cette technique.



MicroAIR U100

Nébuliseur à tamis portable

L'OMRON MicroAIR U100 est un petit nébuliseur portable qui aide à traiter efficacement les affections des voies respiratoires inférieures, telles que l'asthme, la bronchite et la BPCO.

Les nébuliseurs traditionnels peuvent être encombrants, bruyants et nécessiter une prise de courant, ce qui n'est pas très pratique lorsque vous prévoyez de passer la journée dehors ! Désormais, une solution se trouve à votre portée, même en déplacement. En effet, le MicroAIR U100 alimenté par piles est compact, facile à transporter et toujours à votre portée lorsque vous en avez besoin.

Sa technologie de tamis unique le rend plus efficace et plus confortable à utiliser que la plupart des nébuliseurs traditionnels. Son fonctionnement silencieux et sa conception unique facilitent son utilisation dans n'importe quelle position. Il est même possible de l'utiliser en position couchée, ce qui est plus confortable pour les jeunes enfants.

- Portable, compact et alimenté par piles (2 x AA)
- Silencieux, fonctionnement à l'aide d'une seule touche pour une utilisation en toute discrétion
- Dépôt du médicament efficace au fond des poumons
- Fonctionnement à 360° pour une inhalation possible dans toutes les positions



Nébuliseurs à compresseur pour adultes

OMR-C28P(NE-C105-E)

NEW

C28P

Nébuliseur haute efficacité destiné à un usage fréquent

Ce nébuliseur puissant a été développé en collaboration avec des thérapeutes respiratoires pour le traitement efficace des maladies respiratoires telles que l'asthme, la bronchite chronique et les allergies.

- **Advanced Valve Technology (A.V.T.)** - une efficacité accrue avec un rendement supérieur.
- **Efficacité** - assure un dépôt efficace de médicaments dans les poumons pour le traitement des affections, telles que la bronchite, la bronchiolite ou l'asthme.
- **Durable** - compresseur durable et adapté à toute la famille.




Advance Valve Technology (AVT)

L'AVT synchronise le débit de l'aérosol avec la respiration de l'utilisateur et empêche le médicament de s'échapper. Grâce à cette technologie, la quantité optimale de médicaments atteint les poumons.




Phase d'INhalation :

Pendant l'inhalation, la valve inspiratoire (A) s'ouvre et de l'air pénètre dans le nébuliseur. L'air est mélangé à l'aérosol généré (B) et inhalé par le patient via l'embout buccal (C). Au cours de cette phase, la valve expiratoire (D) reste fermée, **ce qui permet de ne pas gaspiller d'aérosol.**

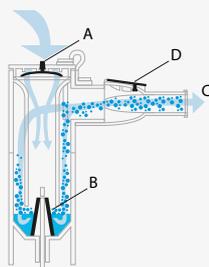

Phase d'EXpiration :

Lors de l'expiration par l'embout buccal, la valve inspiratoire (A) du nébuliseur se ferme, **empêchant l'aérosol de s'échapper du nébuliseur.** L'aérosol généré reste dans le nébuliseur et est disponible pour la prochaine phase d'inspiration. L'air expiré sort de l'embout buccal par la valve expiratoire (D).

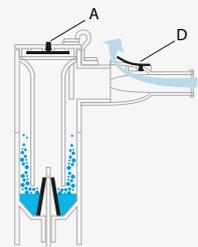

OMR-C900-E



NE-C900

Parfaitement adapté à une utilisation répétée par plusieurs patients, car les pièces peuvent être décontaminées facilement et efficacement entre les applications.

- **Administration efficace du médicament** – avec une taille de particules de MMAD 3 Qm.
- **Nébulisation efficace** – avec un débit de nébulisation de 0,4 ml/min.
- **Compresseur à haute puissance de sortie – adapté à un usage universel.**
- **Kit de nébuliseur structuré en deux parties** – pour un nettoyage et un montage faciles.
- **Nébuliseur portable** – Poignée intégrée pour un transport sûr du nébuliseur d'un patient à un autre.

OMR-C101



C101 Essential

Nébuliseur pour toute la famille.

- **Dépôt efficace** des médicaments pour le traitement des affections des voies respiratoires inférieures
- **Convient à toute la famille**
- **Facile à utiliser et à nettoyer**



Nébuliseurs à compresseur pour enfants

OMR-C303K-KDE

NEW

Nami Cat

Adorable à l'extérieur, puissant à l'intérieur.

Nami Cat est un nébuliseur à compresseur efficace spécialement conçu pour les enfants. La conception adaptée aux enfants aide les plus petits à utiliser leur nébuliseur et à ne pas avoir peur ou à résister à leur traitement.

- **Spécialement conçu pour les enfants.**
- Délivre **efficacement les** médicaments dans les poumons.
- **Traitement rapide** à une vitesse de nébulisation d'environ 0,35 ml/min.





Nébuliseurs à compresseur Pre Cold

OMR-C102

C102 Total

Nébuliseur 2-en-1 avec douche nasale.

L'OMRON C102 constitue une solution unique pour traiter efficacement et soulager les affections respiratoires tout au long de l'année.

En fonction de la saison, différentes zones des voies respiratoires peuvent être affectées par diverses pathologies.

- La douche nasale est utilisée avec une solution saline. Elle nettoie la cavité nasale et **aide à soulager les symptômes** de maladies telles que le rhume, la rhinite allergique ou la sinusite.
- Le nébuliseur offre un **traitement efficace** pour soigner les maladies des voies respiratoires inférieures telles que la bronchite, la bronchiolite et l'asthme.



OMR-C301

DuoBaby

Nébuliseur 2-en-1 avec aspirateur nasal.

Le DuoBaby d'OMRON est un nébuliseur à compresseur 2-en-1 unique en son genre doté d'un aspirateur nasal intégré et breveté pouvant contribuer au traitement des troubles respiratoires les plus courants chez les bébés.

L'aspirateur nasal nettoie en douceur le nez du bébé, réduit la congestion nasale⁴ et permet au bébé de respirer librement. Le nébuliseur permet l'administration efficace du traitement au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures.

- L'utilisation combinée de l'aspirateur nasal et du nébuliseur permet **de manière cliniquement prouvée** de réduire le nombre de jours symptomatiques ainsi que de diminuer la durée des épisodes symptomatiques et la prise de médicaments.
- Aspirateur nasal : **Nettoie délicatement le nez**
- Combinaison avec un nébuliseur pour un **traitement efficace** des voies respiratoires supérieures et inférieures
- Résultats cliniquement prouvés en matière d'efficacité du traitement
- **Spécialement conçu pour les bébés**



Thérapie respiratoire – vue d'ensemble



Modèle	MicroAIR U100 (NE-U100-E)	C28P (NE-C105P-E)	C900 (NE-C900-E)	C101 Essential (NE-C101-E)
Description	Nébuliseur de poche portable	Nébuliseur ultra-efficace pour usage fréquent	Nébuliseur puissant à usage professionnel	Nébuliseur pour toute la famille
Avantages du produit	Silencieux Portable, format de poche et fonctionnement sur pile Dépôt pulmonaire efficace Inhalation possible dans n'importe quelle position	Très efficace Nébulisation rapide Pour une utilisation fréquente et intensive Advanced Valve Technologie en cas d'utilisation de l'embout buccal	Compresseur haut rendement Nébulisation rapide Poignée de sécurité intégrée pour le transport	Dépôt pulmonaire efficace, facile à utiliser et à nettoyer
Utilisateur	Adulte, enfant, bébé 	Adulte, enfant 	Adulte, enfant 	Adulte, enfant 
Pathologie	Voies respiratoires inférieures  Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO	Voies respiratoires inférieures  Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO	Voies respiratoires inférieures  Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO	Voies respiratoires inférieures  Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO
Où l'utiliser	Portable 	À domicile 	Établissements de soins et hôpitaux	À domicile 
MMAD	4,5 Qm	3 Qm	3 Qm	2,6 Qm
Vitesse de nébulisation	> 0,25 ml/min	0,12 ml/min	0,4 ml/min	0,35 ml/min
Accessoires du kit de nébulisation	Masque pour adultes en PVC OMR-9956275-1 Masque pour enfants en PVC OMR-9956276-0 Masque pour jeunes enfants en PVC OMR-9520250-5	Kit de nébulisation pour adultes OMR-NEB6034 Kit de nébulisation pour enfants OMR-NEB6035 Pour le modèle précédent (NE-C28P-E) : KIT OMR-VVT/KIT OMR-VVT ADULTE/KIT OMR-VVT ENFANT/BÉBÉ	Kit de nébulisation et embout buccal OMR-9520555-5	Kit de nébulisation complet avec embout buccal, masque pour adultes en PVC, masque pour enfants en PVC, embout nasal, tuyau à air et adaptateur OMR-NEB-ASKIT-11 Kit de nébulisation pour adultes OMR-NEB6020 Kit de nébulisation pour enfants OMR-NEB6021 Kit de nébulisation embout buccal OMR-NEB6022
Kit de nébulisation pour location			Lifecare adultes LFC-6003-TR Lifecare enfants LFC-6004-TR	Lifecare adultes LFC-6003-TR Lifecare enfants LFC-6004-TR



Nami Cat (NE-C303K-KDE)	C102 Total (NE-C102-E)	DuoBaby C301 (NE-C301-E)
Nébuliseur de forme attrayante et adaptée aux enfants	Nébuliseur 2-en-1 avec douche nasale	Nébuliseur 2-en-1 avec aspirateur nasal
Adorable à l'extérieur, puissant à l'intérieur Dépôt pulmonaire efficace	Soulage l'encombrement nasal Nettoie la cavité nasale Dépôt pulmonaire efficace	Réduit les obstructions nasales Réduit le risque d'infections Traitement des voies respiratoires inférieures et supérieures Accessoires hygiéniques entièrement lavables
Enfant, bébé 	Adulte, enfant 	Bébé 
Voies respiratoires inférieures  Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO	Voies respiratoires supérieures  Rhumes, rhinite allergique, sinusite Voies respiratoires inférieures  asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO	Voies respiratoires supérieures  Nez bouché, rhumes, rhinite allergique, laryngite Voies respiratoires inférieures  Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO
À domicile 	À domicile 	À domicile 
3,4 Qm	Douche nasale : 90 % de particules >10 Qm Nébuliseur : 2,6 Qm	9 Qm - 4 Qm
0,35 ml/min	>5 ml/min - 0,35 ml/min	0,4 ml/min - 0,2 ml/min
Kit de nébulisation OMR-NEB6024 Masque pour adultes OMR-NEB6007 Masque pour enfants OMR-NEB6008 Embout buccal OMR-NEB6019	Kit de nébulisation complet avec embout buccal, masque pour adultes en PVC, masque pour enfants en PVC, embout nasal, tuyau à air et adaptateur OMR-NEB-ASKIT-11 Kit de nébulisation pour adultes OMR-NEB6020 Kit de nébulisation pour enfants OMR-NEB6021 Kit de nébulisation embout buccal OMR-NEB6022	Kit de nébulisation (y compris 2 embouts de nébulisation) avec masque pour bébé, masque pour adulte, embout buccal, 3 filtres à air et un tuyau d'air) OMR-NEB2012 Aspirateur avec tuyau à air OMR-NEB7000



OMRON

Gestion de la douleur

Soulager les douleurs sans médicaments

La mobilité et un mode de vie actif sont essentiels pour se sentir bien. Mais la douleur est l'un des freins les plus importants au maintien d'une vie active, qui est susceptible de limiter sérieusement vos possibilités. Les appareils OMRON vous aident à soulager les symptômes de la douleur.

Nos produits de haute qualité sont basés sur la technologie TENS, une technologie cliniquement prouvée qui aide à calmer les douleurs musculaires et articulaires. Cette technologie est largement utilisée par de nombreux professionnels de la santé, notamment les kinésithérapeutes et les spécialistes de la douleur.

Gestion de la douleur avec les appareils TENS d'OMRON

- ✓ Blocage de la transmission du signal de la douleur
- ✓ Stimulation de la production d'endorphines
- ✓ Amélioration de la circulation sanguine



HeatTens

Chaleur apaisante et technologie TENS pour soulager les douleurs musculaires et articulaires.

- HeatTens offre une double thérapie qui combine deux thérapies complémentaires pour soulager la douleur : CHALEUR + TECHNOLOGIE TENS
- La chaleur relâche les muscles et atténue la douleur. Les pulsations électriques stimulent le mécanisme de soulagement de la douleur du corps.
- Technologie TENS triple action : contribue à bloquer le signal de la douleur, à stimuler la production d'endorphines et à améliorer la circulation sanguine
- Options de traitement personnalisées : 3 principaux traitements, 2 intensités de chaleur, 9 modes TENS prédéfinis pour des zones du corps spécifiques et 20 réglages d'intensité pour personnaliser le traitement



E3 Intense

Portable et efficace.

- Technologie TENS triple action : contribue à bloquer le signal de la douleur, à stimuler la production d'endorphines et à améliorer la circulation sanguine
- Options de traitement personnalisées : 3 principaux traitements, 9 modes TENS prédéfinis pour des zones du corps spécifiques et 15 réglages d'intensité pour personnaliser le traitement
- Électrodes longue durée : lavables et réutilisables jusqu'à 150 fois
- Conception compacte : facile à transporter

OMR-POCKET.TENS

NEW

PocketTens

Petit appareil antidouleur qui tient dans la main

Cet appareil utilise la technologie Triple Action TENS (neurostimulation électrique transcutanée) qui aide à bloquer les messages de douleur et stimule le soulagement naturel de la douleur grâce à une meilleure circulation sanguine.

- **Cinq positions prédéfinies** (bras/épaule, bas du dos, jambe/pied, malaxage, constant).
- **Dix niveaux d'intensité** (de 1 faible à 10 élevé).
- Paire d'électrodes (durables, réutilisables, lavables, jusqu'à 150 utilisations).
- **Arrêt automatique** après 15 minutes.
- Les voyants lumineux vous permettent de contrôler clairement votre traitement avec le mode et le niveau d'intensité.
- Le témoin de pile s'allume pour vous rappeler de changer les piles.
- Le témoin des électrodes clignote si une (les) électrode(s) présente(nt) une défaillance.

Gestion de la douleur – vue d'ensemble



Modèle	HeatTens (HV-F311-E)	E3 Intense (HV-F021-EW)	PocketTens (HV-F013-E)
Technologie thermique Détend les muscles et atténue la douleur	2 niveaux de chaleur (ou sans chaleur)		
Technologie TENS triple action Bloque le signal de la douleur, stimule la production d'endorphines et améliore la circulation sanguine	●	●	●
Sans médicament	●	●	●
Zones de traitement	6 zones de traitement : dos, épaule, articulations, jambe, bras, plante des pieds (ou pieds)	6 zones de traitement : dos, épaule, articulations, jambe, bras, plante des pieds (ou pieds)	5 positions prédéfinies (bras/ épaule, bas du dos, jambe/ pied, malaxage, constant)
Modes massage	3 modes de massage : tapotement, malaxage, frottements	3 modes de massage : tapotement, malaxage, frottements	
Niveaux d'intensité	20	15	10
Affichage	●	●	
Gels	OMR-HV-PAD-3E OMRON – Gel pour électrodes (4 kits)		
Électrodes		Électrodes longue durée réutilisables jusqu'à 150 fois OMR-E-LLIFEPADS	Électrodes longue durée réutilisables jusqu'à 150 fois OMR-E-LLIFEPADS



OMRON

Balance numérique et Moniteur de composition corporelle

Une vue d'ensemble précise de votre corps

OMRON propose une gamme de balances numériques. Mais si vous souhaitez une représentation plus complète de votre corps que le simple relevé du poids, vous avez besoin d'un moniteur de composition corporelle, qui mesure le pourcentage de masse adipeuse et de masse musculaire présent dans le corps. Utilisé de façon régulière, il calcule et enregistre les changements qui s'opèrent dans votre corps, ce qui vous assure de ne pas perdre du muscle lorsque vous essayez de perdre de la masse adipeuse, par exemple. Les appareils de mesure de la composition corporelle OMRON ont été validés cliniquement, afin de garantir des relevés précis et fiables.



Balances avec moniteur de composition corporelle

OMR-VIVA



VIVA

Influencez l'avenir de votre cœur.

Moniteur de composition corporelle intelligent doté de paramètres clés éprouvés contribuant à la bonne santé cardiaque.

- **Précision validée cliniquement**
- Suivi intelligent de **6 paramètres corporels**
- Paramètres de santé cardiaque : graisse viscérale, masse adipeuse et muscle squelettique
- Métabolisme au repos, IMC et poids
- **Classification des résultats**
- Reconnaissance automatique des utilisateurs
- 4 utilisateurs + invité
- **Mesure rapide en 4 secondes**
- Transfert fluide des données vers l'**application OMRON Connect** via Bluetooth



OMR-BF511B-E (bleu)
OMR-BF511T-E (turquoise)



BF511

**Toutes les données disponibles,
avec une précision éprouvée.**

Notre solution BF511 constitue le moniteur de composition corporelle le plus complet d'OMRON pour les mesures main-pied. Elle confère des connaissances étendues sur la graisse viscérale, la masse adipeuse, le taux de muscle squelettique, l'IMC et le métabolisme au repos.

- Appareil cliniquement validé, doté de 8 capteurs pour des mesures combinées main-pied
- Affichage de la graisse viscérale, de la masse adipeuse, du taux de muscle squelettique, de l'IMC, du métabolisme au repos et du poids

OMR-BF214



BF214

Intelligence par comparaison.

- Affichage de la masse adipeuse, du taux de muscle squelettique, de l'IMC et du poids
- Enregistrement de la dernière mesure

OMR-BF212



BF212

Au-delà de l'indication du poids.

- Affichage de la masse adipeuse, de l'IMC et du poids

Balances

OMR-HN-300T2-EBK (noir)
OMR-HN-300T2-EGY (gris)

NEW



HN300T2 Intelli IT

Balance connectée !

Gérez votre poids en toute simplicité avec la balance HN300T2 Intelli IT et notre application OMRON Connect.

- **Connected** – ce moniteur peut être connecté à l'application OMRON Connect, ce qui permet aux utilisateurs de consulter facilement leurs données à tout moment.
- **Fonction de filtrage automatique** – Grâce à la fonction de filtrage automatique, les utilisateurs de l'application OMRON Connect peuvent visualiser uniquement leur propre poids même si la balance est utilisée par plusieurs utilisateurs.
- **Technologie Step on** – La balance s'allume automatiquement dès que vous montez dessus.
- **Mémoire** – La balance peut mémoriser jusqu'à 30 mesures.

OMR-HN-286-E



HN286

Se peser en toute simplicité.

- Précision : précision à 100 g près
- Poids max. jusqu'à 180 kg

OMR-HN-289-EBK (noir)
OMR-HN-289-ESL (gris soie)



HN289

Se peser en toute simplicité.

- Précision : précision à 100 g près
- Poids max. jusqu'à 150 kg



OMR-HN-300T2-EGY (gris)

Balances – vue d'ensemble




Modèle	VIVA (BF222T-EBK)	BF511 (HBF-511T-E)	BF214 (HBF-214-EBW)
OMRON Connect.	•		
Masse adipeuse (en %) Quantité de masse adipeuse en pourcentage du poids corporel total	•	•	•
Indice de masse corporelle Rapport entre le poids et la taille d'une personne	•	•	•
Muscle squelettique (en %) Muscles attachés aux os utilisés pour commander les mouvements du corps	•	•	•
Graisse viscérale Tissu adipeux enveloppant les organes	•	•	
Taux de métabolisme au repos Apport calorique minimum pour assurer le fonctionnement quotidien de l'organisme	•	•	
Mesure du corps entier Mesures combinées main-pied à l'aide de huit capteurs		•	
Validé cliniquement	•	•	•
Nombre de profils d'utilisateurs configurables (en plus des invités)	4	4	4
Fonction de mémoire Affichage de la mesure précédente	30*	•	•
Différence de poids Pesée facile de petits éléments (un sac, p. ex.) ou d'un bébé			
Tranche d'âge	10-80 ans	6-80 ans	10-80 ans
Incréments	100 g	100 g	100 g
Poids maximum	150 kg	150 kg	150 kg
Matériau	acier inoxydable/verre	acier inoxydable/plastique	acier inoxydable/verre
Technologie Marche/Arrêt	interrupteur de capteur	interrupteur	interrupteur de capteur



BF212 (HBF-212-EW)	HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK/HN-300T2-EGY)	HN286 (HN-286-E)	HN289 (HN-289-E)
	•		
•			
•	•		
•			
4	2		
	30		
10-80 ans	S/O	S/O	S/O
100 g	100 g	100 g	100 g
150 kg	150 kg	180 kg	150 kg
acier inoxydable/verre	verre/plastique	verre/plastique	verre/plastique
interrupteur de capteur	marche/arrêt automatique	marche/arrêt automatique	marche/arrêt automatique



36.8

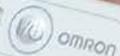

omron

OMRON

Mesure de la température

La fièvre représente un signe précoce d'un ennui de santé. Vous voulez pouvoir compter sur la plus grande fiabilité.

Un thermomètre est un appareil médical qui mesure la température corporelle centrale, c'est-à-dire la température de votre cœur, de votre cerveau et d'autres organes. OMRON vous offre une gamme complète de thermomètres précis auriculaires ou de type stylo.

Les thermomètres auriculaires sont très précis, car ils peuvent détecter la chaleur infrarouge émise par l'oreille moyenne, ce qui vous permet d'obtenir des résultats précis si le thermomètre est correctement placé.



Thermomètres auriculaires

OMR-MC-521-E



Thermomètre auriculaire Gentle Temp 521

Des mesures avancées et précises en une seconde.

- Solution 3 en 1 : Mesure de la température ambiante et de la température des surfaces (p. ex. biberon de lait), en plus de la prise de température auriculaire
- Utilisation possible dans une pièce sombre grâce au grand écran éclairé
- Suivi de la température : espace mémoire pour 25 mesures

OMR-MC-520-E



Thermomètre auriculaire Gentle Temp 520

Des mesures précises en une seconde.

- 9 dernières mesures en mémoire
- Design ergonomique



Thermomètres de type stylo



OMR-FlexTempSmart



Flex Temp Smart

Pointe flexible pour un confort supplémentaire.

- Résistant à l'eau
- Mesure rapide en 10 secondes
- Étui de protection

OMR-EcoTempBasic



Eco Temp Basic

Buse arrondie pour une utilisation sûre et pratique.

- Résistant à l'eau

Mesure de la température – vue d'ensemble



Modèle	Gentle Temp 521 (MC-521-E)	Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Type de mesure	Oreille, surface, température ambiante	Oreille
OMRON Connect		
Fonctions de mesure 3-en-1 Température ambiante, de la surface et corporelle	●	
Rétroéclairage	●	
Signal sonore Envoi d'un signal à la fin de la mesure	●	●
Mémoire	25	9
Mesure rapide en 1 seconde	●	●
Sélection °C/°F	●	●
Grand écran à 3 chiffres	●	●
Pile remplaçable	●	●
Résistant à l'eau		
Arrêt automatique	●	●
Housse de protection (couvre-sonde)	21 pièces incluses Housses de protection 40 pièces OMR-MC-EP2-E	21 pièces incluses Housses de protection 40 pièces OMR-MC-EP2-E



Flex Temp Smart (MC-343F-E)	Eco Temp Basic (MC-246-E)
Oreille, aisselle, voie rectale	Oreille, aisselle, voie rectale
●	●
dernière mesure	dernière mesure
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
Non inclus Housses pour thermomètres de type stylo 100 pcs OMR-9512254-4	Non inclus Housses pour thermomètres de type stylo 100 pcs OMR-9512254-4



www.hospidex.eu
info@hospidex.eu

Marketed by
Hospidex nv/sa
Grijpenlaan 23
3300 Tienen
Belgium
Tel. +32 16 77 89 31

Distributed by

