



DE TOEKOMST VAN TAPING

Doelgerichte mobilisatie van huid en weefsel



Kinesiology Tape:

Hoeksteen van fysiotherapeutische
behandeling

De opmars van kinesiologie tape begon in de vroege jaren 70. Het is een integraal onderdeel geworden van de moderne fysiotherapie en wordt sindsdien vrijwel onveranderd gebruikt.

De toekomst tegemoet

Soms leiden kleine innovaties tot grote vooruitgang. In lijn met dit principe hebben we de klassieke SISSEL Kinesiology Tape verder ontwikkeld om u geheel nieuwe behandel mogelijkheden voor te stellen.

Verrassend eenvoudig – Verbazingwekkend effectief

Met slechts een paar eenvoudige stappen transformeert de beproefde SISSEL Kinesiology Tape in een oplossing dat volledig nieuwe behandelmogelijkheden biedt.

Het geperforeerde rugpapier en een kleine vouw van de tape creëren een kenmerkende ,activatieflap' aan de achterkant.

Dit maakt een effectieve en duurzame manipulatie van diepere huidlagen en bindweefsel mogelijk door middel van trek- en cirkelvormige bewegingen.



De doorlopende activatieflap van het ene uiteinde van de tape tot het andere maakt een precieze en nauwkeurige grip mogelijk. Net dáár waar uw patiënten het nodig hebben.




EPIFLOW: Kruipt onder de huid


Ervaar precisie als nooit tevoren. EPIFLOW maakt de behandeling van diepere huidlagen mogelijk, waardoor moeilijk bereikbare gebieden ,tastbaar' worden. Benut het volle potentieel van uw therapieën en til uw praktijk naar een hoger niveau met EPIFLOW.

Hoe werkt de **SISSEL® EPIFLOW Kinesiology Tape** ?

FASCIA MET NORMALE BLOEDSTROOM

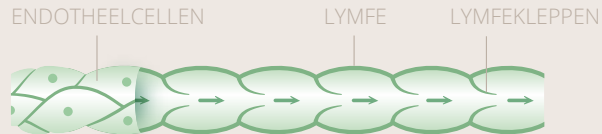


„GESTRESSEERDE“ FASCIA MET SAMENGETROKKEN
ENDOTHEELCELLEN EN VERMINDERDE BLOEDSTROOM

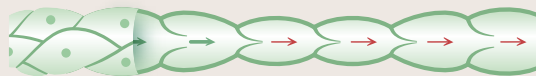

EPIFLOW
PRECISION TAPING

„ONTSPANNING“ EN PRECISE VASODILATATIE VAN DE
ENDOTHEELCELLEN DOOR DE LIFTFUNCTIE

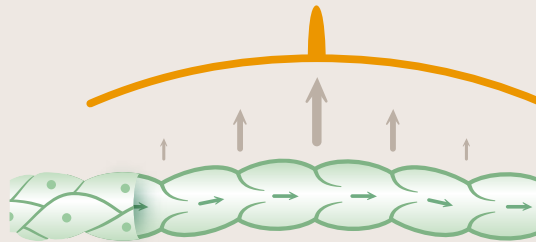

Toepassingsmogelijkheden van **EPIFLOW**

Algemene weefselactivatie

De EPIFLOW Kinesiology Tape verbetert effectief de flexibiliteit en bloedcirculatie in het weefsel, bereikt diepe huidlagen en stimuleert de lymfestroom.

Lymfoedeembehandeling

Gerichte behandeling van primair of secundair lymfoedeem is nu mogelijk met EPIFLOW. Door de tape aan te brengen op de veneuze hoek of andere gebieden van het lymfestelsel, kunt u de lymfestroom positief beïnvloeden en zwelling verminderen.

Toepassing op littekenweefsel

Artsen en fysiotherapeuten melden opmerkelijk positieve resultaten bij het gebruik van EPIFLOW op littekenweefsel. Regelmatige toepassing op genezen littekens kan helpen het littekenweefsel losser te maken en de doorbloeding rond het gebied te bevorderen. Patiënten hebben aanzienlijk verbeterde sensaties en merkbare verbeteringen in de textuur van de huid na de behandeling gerapporteerd.





Hoe **EPIFLOW** te gebruiken

Het gebruik van de EPIFLOW Kinesiology Tape is eenvoudig en vereist slechts een paar extra stappen in vergelijking met traditioneel tapen.


1. Verwijder de beschermstrip

Begin met het verwijderen van alleen de middelste beschermstrip van de achterkant van de tape.




2. Plooi de activatieflap

Vouw de EPIFLOW Kinesiology Tape in de lengte.
De verwijderde beschermstrip zorgt ervoor dat dit
deel aan elkaar kleeft

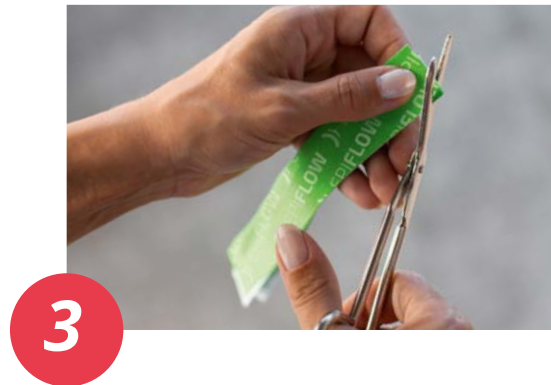

3. Snijd de hoeken bij

Voor optimale hechting wordt aanbevolen om de
hoeken recht af te snijden. Het afronden van de
hoeken, zoals gedaan in traditionele kinesiology
toepassingen, is niet nodig.

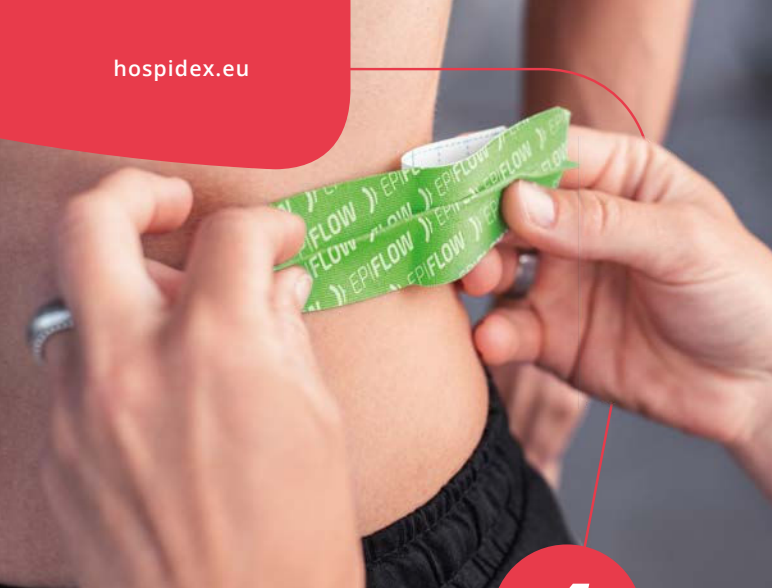

4

4. Breng de tape aan

Verwijder nu de resterende beschermstrips van de EPIFLOW Kinesiology Tape en breng deze AAN ZONDER REKKING. De benodigde spanning wordt later tijdens de behandeling bereikt.



5

5. Beweging en activatie

Grijp de activatieflap van de aangebrachte EPIFLOW Kinesiology Tape met uw duim, wijs- en middelvinger op het niveau waar u het weefsel wilt activeren. Trek de tape van het lichaam weg totdat een bepaalde spanning wordt gevoeld. Beweeg vervolgens in langzame, gecontroleerde cirkels, waarbij u de spanning behoudt – 5 keer met de klok mee, gevolgd door 5 keer tegen de klok in.

Herhaal dit proces op alle gewenste locaties langs de tape.

Het wordt aanbevolen om deze routine drie keer per dag uit te voeren.

Geef uw patiënten de regie!

Na begeleiding door een professional kunnen patiënten de toepassing gemakkelijk zelf uitvoeren.

Deze eenvoudige methode moedigt patiënten aan om zelf aan hun genezing bij te dragen. Bovendien kan actieve betrokkenheid bij het getroffen gebied van het lichaam zowel het mentale als fysieke genezingsproces ondersteunen.

Kies ook zelf je kleur

De EPIFLOW Kinesiology Tape is verkrijgbaar in de populaire kleuren roze, blauw, limoengroen en zwart. We bieden ook twee huidtinten aan (licht en donker) voor een cosmetisch onopvallende toepassing.



www.hospidex.eu
info@hospidex.eu

Marketed by Hospidex nv/sa

Grijpenlaan 23
B-3300 Tienen, Belgium
Tel. +32 16 77 89 31

Hospidex BV

Lorentzstraat 101
2665JG Bleiswijk, Nederland
Tel: +31 85 902 00 34

Distributed by